

## Installationshinweise Fernwartungstool / Installation instruction remote maintenance tool

1. Download Software unter <https://get.teamviewer.com/pcebryn> - Fernwartungs-  
tool  
Download software via <https://get.teamviewer.com/kzv635k> - Tool for remote  
maintenance
2. Browser öffnet sich automatisch. EXE-Datei wird heruntergeladen (Bild 1).  
Browser opens automatically. EXE file is downloaded (Image 1).

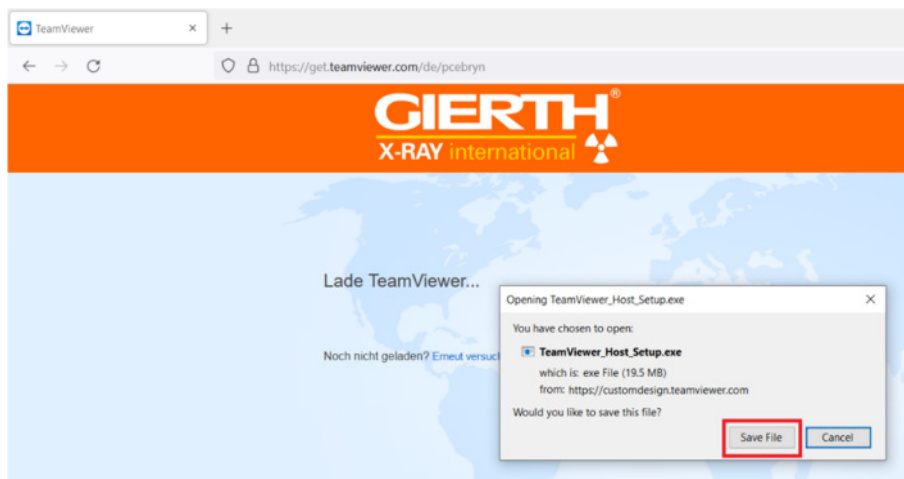


Bild 1 / Image 1

3. Öffnen Sie die Datei für das Setup. → „Save file“ auswählen (Bild 2).  
Open file to start setup. → Click “Save file” (Image 2).



Bild 2/ Image 2

4. TeamViewer Host Setup öffnet sich. „Next“ auswählen (Bild 3).  
Window TeamViewer Host Setup opens. Choose “Next” (Image 3).

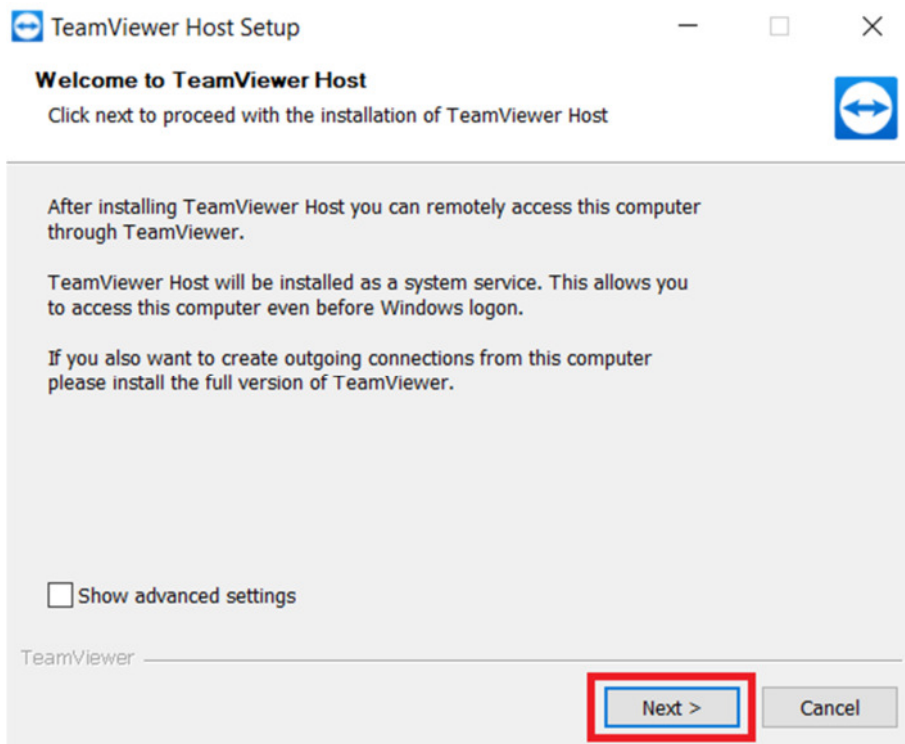


Bild 3 / Image 3

X-RAY CAN BE SO EASY...

5. Installation wird durchgeführt (Bild 4). Bitte warten Sie auf die Beendigung und wählen Sie „Close“ (Bild 5).  
Installing (Image 4). Wait until installation was completed and choose “Close” (Image 4).

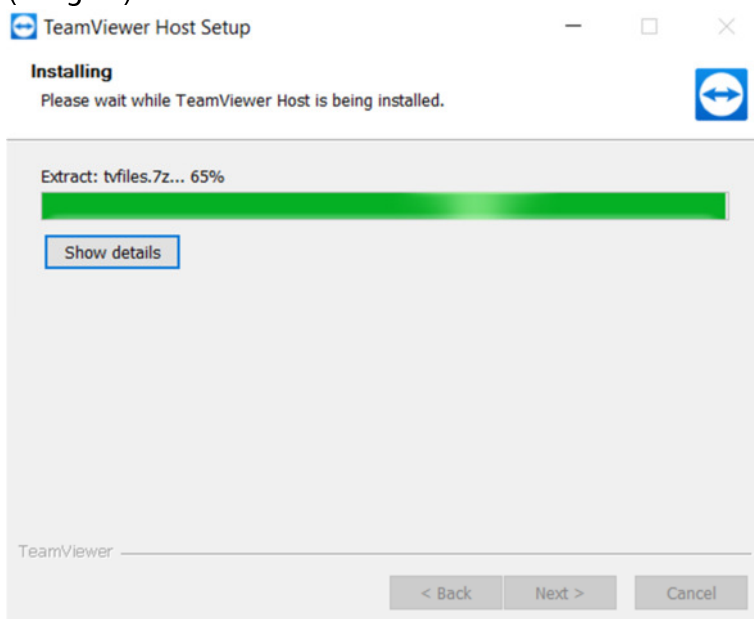


Bild 4 / Image 4

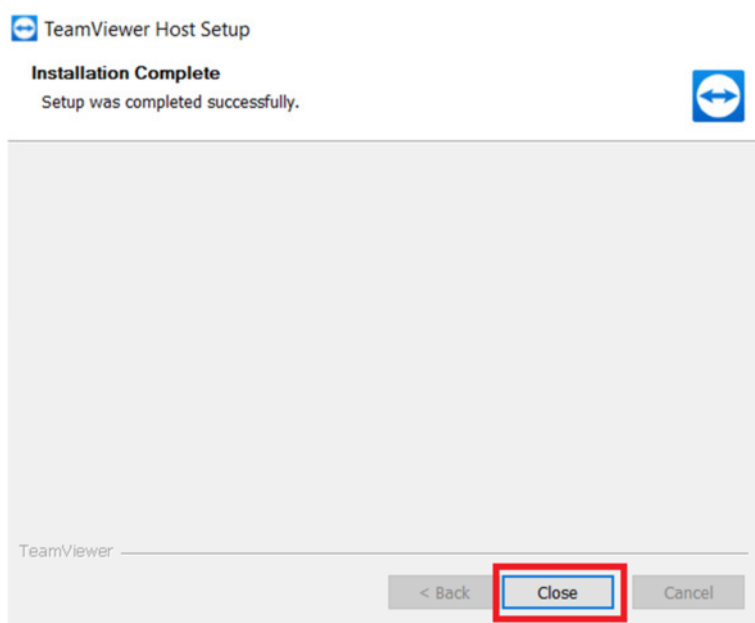


Bild 5 / Image 5

6. Wählen Sie "I accept the EULA and the DPA" und klicken Sie "Continue" (Bild 6).  
Choose "I accept the EULA and the DPA" and Click "Continue" (Image 6).

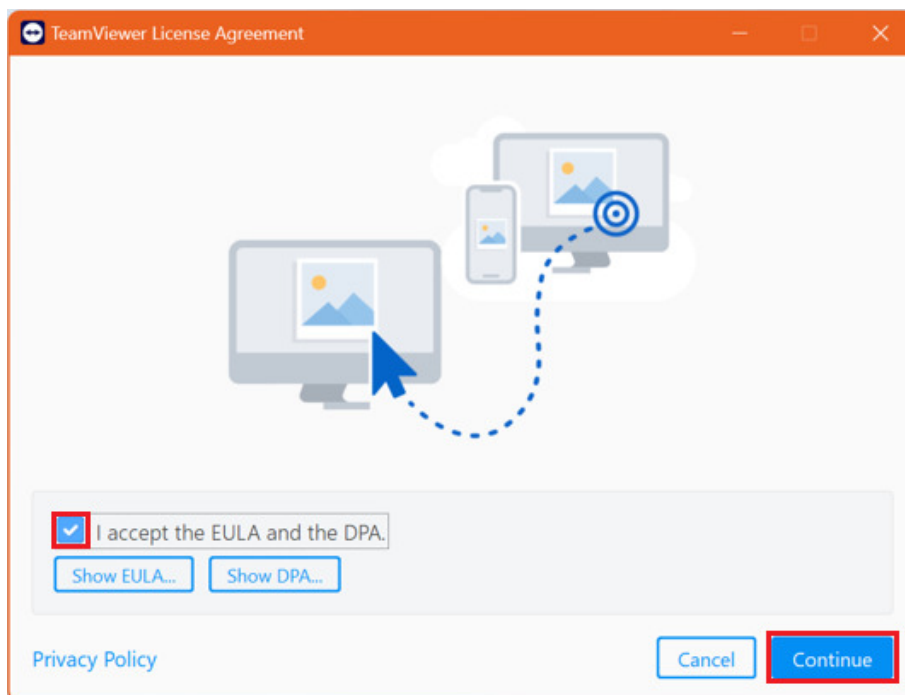


Bild 6 / Image 6

7. Wählen Sie bei der Kontenverwaltung "Cancel" (Bild 7).  
Please choose „Cancel“ for the Account assignment (Image 7).

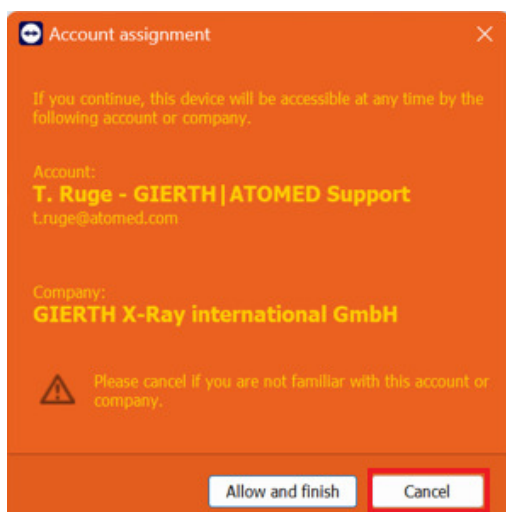


Bild 7 / Image 7

8. Installation ist abgeschlossen. (Bild 8).  
Installation completed. (Image 8).

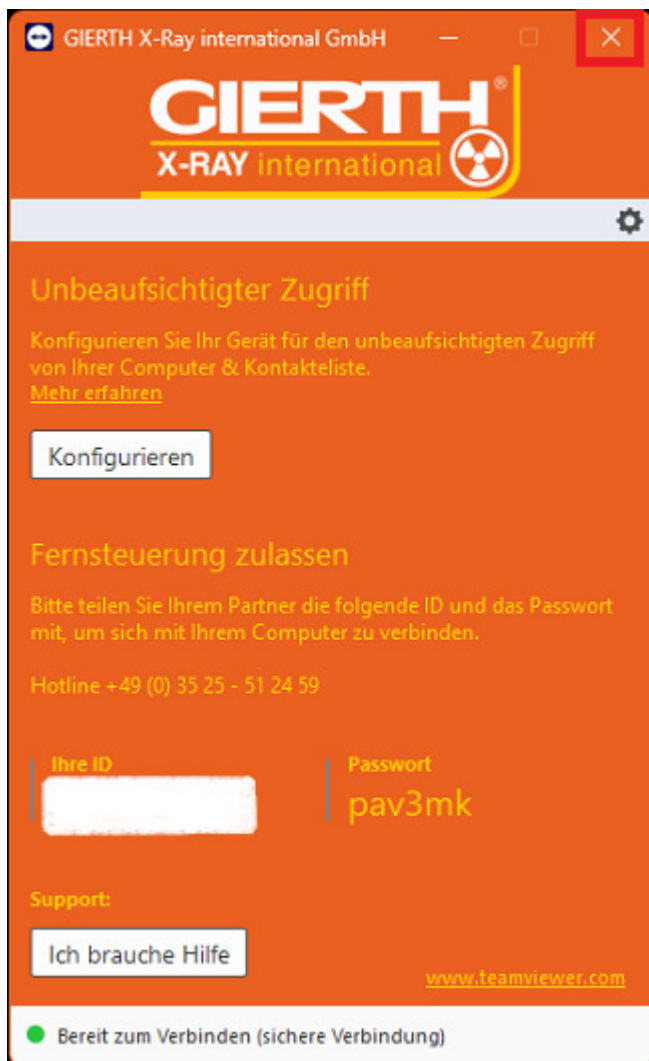


Bild 8 / Image 8

X-RAY CAN BE SO EASY...